


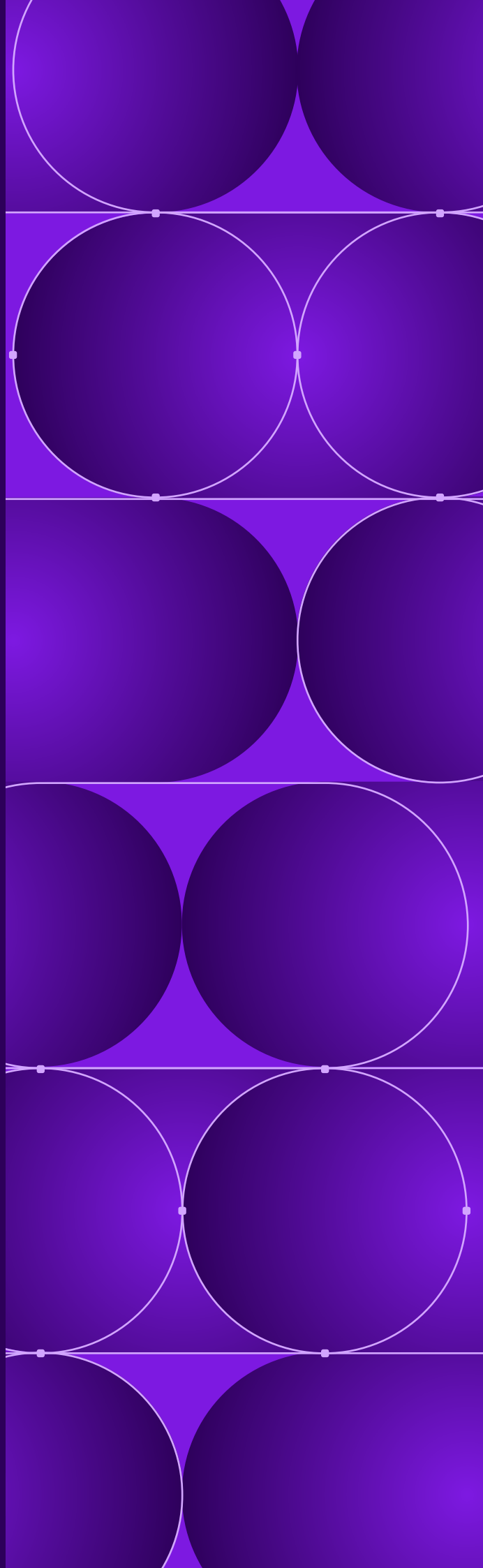

EXTRACTA® KIT MPTA MDx

/ DNA e RNA de PATÓGENOS MDx
(MPTA-PU08 / 16 / 16 (10)-B MDX)



/KIT DE EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE DNA E RNA

EXTRACTA® KIT - DNA e RNA de Patógenos MDx

O kit de extração e purificação **EXTRACTA® KIT – DNA e RNA DE PATÓGENOS – MPTA MDx**, baseia-se na tecnologia de micropartículas magnéticas e transferência de fase sólida por imobilização reversível (SPRI); as esferas magnéticas são revestidas por uma camada de polímeros com afinidade por ácidos nucleicos em condições de alta concentração de sais.

Ideal para o isolamento de DNA e RNA de diversos tipos de microrganismos em amostras como soro, swabs, suspensão em PBS, meio de transporte viral, tecidos diversos, fluidos corpóreos, artrópodes, entre outras.

O protocolo de extração pode ser realizado em sistemas automatizados de extração magnética da marca Loccus ou outros. O kit é composto por tampão de lise e ligação, solução com esferas magnéticas, três tampões de lavagem, solução de eluição e proteinase K. O protocolo segue as seguintes etapas: lise celular por digestão química e enzimática de estruturas celulares; adsorção dos ácidos nucleicos na superfície das partículas magnéticas, purificação do lisado celular por meio de sucessivas lavagens; eluição dos ácidos nucleicos das micropartículas magnéticas.

O DNA/RNA extraído e purificado possui pureza e rendimento necessários para uma grande gama de análises em biologia molecular, como amplificações por PCR, qPCR, sequenciamento, NGS, genotipagem, entre outras técnicas.

> Apresentação:

O **EXTRACTA® KIT MPTA MDx** para extração de DNA e RNA de Patógenos é apresentado em placas deepwell de 96 poços fundos, formato de fundo U, contendo todos os reagentes de purificação prontos para que a amostra seja adicionada. Cada placa de extração permite a extração simultânea de 08 ou 16 amostras. Inclui reagentes suficientes para o processamento de 48, 96 ou 960 testes, contendo:

- 6/60 Placas deepwell de 96 poços com reagentes envasados
- 1/2/20 Proteinase K (1,05 mL, 20 mg/mL)
- 6/12/120 Tiras plásticas descartáveis para hastes magnéticas

- Solução de eluição à parte para uso livre ou em espectrofotômetro (100/1000 µL);
- Manual de instruções para usuário
- Itens relacionados não inclusos:
- Tampão DB1 para digestão de tecidos
- Tampão LS1 para amostras de fezes
- Tampão DB3 para digestão de bactérias e artrópodes
- Tampão LB5 para digestão de fungos
- Lisozima



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

/SOBRE O PRODUTO

Kit de extração e purificação **EXTRACTA® KIT – DNA e RNA DE PATÓGENOS – MPTA MDx**, através de micropartículas magnéticas.

Ideal para o isolamento de DNA e RNA de diversos tipos de microrganismos em amostras. O DNA/RNA extraído é ideal para análises em biologia molecular, como amplificações por PCR, qPCR, sequenciamento, NGS, genotipagem, entre outras técnicas. Compatível com Extracta 16, Extracta 32, Extracta Station 4800. Caixa com 48 testes, 96 testes ou 960 testes.

_ **Compatível com instrumentos:** Extracta® 16, Extracta® 32, Extracta® Station 4800 (Loccus)

_ **MODELOS:** MPTA-PU08-B MDx
MPTA-PU16-B MDx
MPTA-PU16-B MDx (10)

_ **MARCA/FABRICANTE:** Loccus

_ **PROCEDÊNCIA:** Brasil

_ **VALIDADE:** 12 meses

_ **PRODUTO IVD**

_ **REGISTRO ANVISA:** 82472170055

/KIT DE EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE DNA E RNA

EXTRACTA® KIT - DNA e RNA de Patógenos MDx

- _ **Tipos de amostras:** Soro, plasma, sangue total, swabs (nasofaríngeo, orofaríngeo e outros), saliva, suspensão em PBS, suspensões em solução salina, meio de transporte viral, lavado bronco alveolar, escarro, líquidos cavitários, LCR (líquor), fezes, fluidos corpóreos, material citológico, aspirado respiratório, tecidos diversos – raspado epitelial, raspado de contato, biópsia, músculos; hemocultura, caldo de cultura, suspensão, placa de cultura, esporos e artrópodes
- _ **Tipos de microrganismos:** Vírus (DNA e RNA), protozoários, helmintos, fungos e bactérias (Gram positivas e Gram negativas)
- _ **Volume da amostra:** 100-300 µL
- _ **Volume de eluição:** 80 µL
- _ **Tempo do protocolo:** De 30 a 45 minutos
- _ **Armazenamento:** temperatura ambiente
- _ **Registro ANVISA:** 82472170055

- > Acondicionado em embalagem apropriada para integridade do produto
- > Rótulo contendo número de lote, data de fabricação, data de validade e guia de armazenamento
- > Kit pré-ensvasado com tampão de eluição (Buffer Low-TE)